

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Переговорное устройство
MP-522W1

Паспорт

Версия 01/18

Москва

2018

Оглавление

1. Назначение	2
2. Комплект поставки.....	2
3. Технические характеристики	2
4. Порядок работы.....	2
5. Порядок установки	3
6. Эксплуатация	3
7. Требования по электро- и пожаробезопасности	3
8. Правила хранения и эксплуатации.....	3
9. Гарантийные обязательства.....	4
10. Свидетельство о приемке	4

1. Назначение

Переговорное устройство громкой связи MP-522W1 предназначено для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкой дуплексной связи, а также для связи персонала отделения (до 6 абонентов) с постом медсестры. Изделие предназначено для работы в составе оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP».

2. Комплект поставки

В состав комплекта поставки переговорного устройства MP-522W1 входят:

1. Переговорное устройство MP-522W1, шт.	1
2. Самоклеящаяся наклейка, шт.	1
3. Комплект крепежа на стену, шт.	1
4. Паспорт, шт.	1
5. Упаковка, шт.	1

3. Технические характеристики

Переговорное устройство MP-522W1 имеет следующие технические характеристики:

Режим громкой полудуплексной связи	есть
Напряжение питания	$\pm 12\text{ В} \pm 10\%$
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	10
Потребляемый ток в активном режиме пик, мА	90
Диапазон рабочих температур, °С	$+5 \div +45$
Размеры, мм	165 x 103 x 35
Конструктив	накладной
Вес, г	150
Срок службы, не менее	5 лет

4. Порядок работы

Для посылки вызова необходимо нажать цифровую кнопку вызова, расположенную в центре лицевой панели переговорного устройства.

К переговорному устройству можно дополнительно подключить выносную цифровую кнопку вызова для лежачих больных MP-432W1.

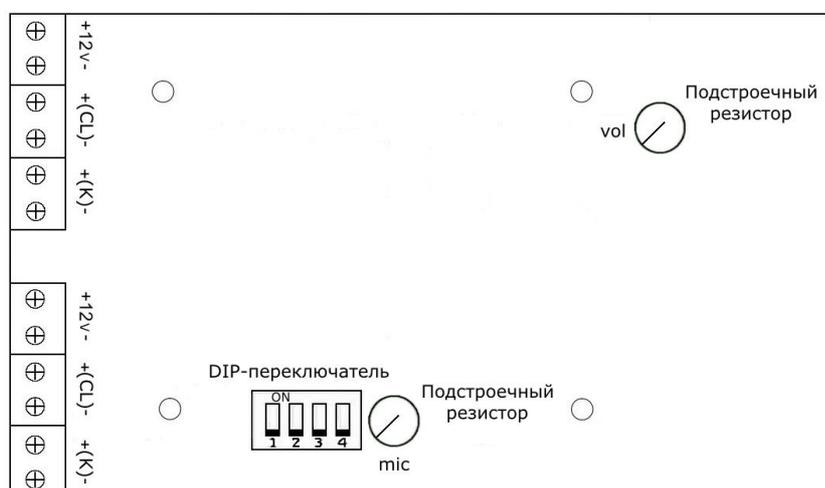


Рисунок 1. Плата MP-522W1

5. Порядок установки

Монтаж переговорного устройства осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с переговорного устройства.
2. При необходимости удалить тонкие перемычки на крышке или доньшке со стороны подхода кабеля.
3. Подсоединить 6-ти проводный кабель попарно на клеммы цифровых кнопок «+(K)-», клеммы линии разговорного тракта «+(CL)-» и клеммы питания «+12v-», расположенные на плате переговорного устройства, к таким же клеммам на плате палатной консоли или системного контроллера, соблюдая полярность.
4. Закрепить доньшко на стене с помощью 4-х саморезов.
5. При необходимости с помощью отвертки отрегулировать чувствительность микрофона mic и громкость динамика vol.
6. Закрыть крышку, закрепив ее с помощью 4-х саморезов, и установить заглушки (в комплекте 2 левых и 2 правых заглушки).
7. Для подключения выносной цифровой кнопки вызова MP-432W1 к переговорному устройству, подсоедините 2-х проводный кабель от кнопки вызова к клеммам «+(K)-» на плате переговорного устройства без соблюдения полярности.

Установите устройство в выбранном месте.

Корпус переговорного устройства может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Самоклеящаяся наклейка в центре корпуса из комплекта поставки монтируется в конце установки изделия.

Перед началом работы необходимо запрограммировать номер переговорного устройства в системе. Для этого на DIP-переключателе, расположенном на плате, установить выключателями 1-4 номер переговорного устройства (от 1 до 9) в двоичном коде – «ON» - 1, «OFF» - 0 (см. таблицу). Номер задается в диапазоне от 1 до 7. Причем номера 6 и 7 рекомендуется использовать при монтаже переговорного устройства в санузлах.

Номер переговорного устройства	Положение выключателей на DIP- переключателе			
	1	2	3	4
1	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	ON	ON	OFF
7	OFF	ON	ON	ON
8	ON	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON

6. Эксплуатация

Режим эксплуатации не требует особых условий, кроме соблюдения режимов, указанных в пунктах 3 и 8.

7. Требования по электро- и пожаробезопасности

К монтажу изделия допускаются лица, имеющие допуск для работы с электроустановками до 1000 В и прошедшие плановый инструктаж.

Применяемые инструменты должны находиться в исправном состоянии, диэлектрические элементы инструмента не должны иметь повреждений.

Измерительные приборы должны иметь действующие свидетельства о прохождении поверки и соответствовать установленным требованиям.

В процессе проведения настройки и проверки, необходимо контролировать температуру устройства и первичного источника питания. Она не должна превышать 40 °С. В случае появления постороннего запаха или задымления - немедленно прекратить работы и принять меры для недопущения возгорания.

8. Правила хранения и эксплуатации

Хранение изделия:

- Температура окружающего воздуха, °С -5..+40
- Влажность 80%

Устройство MP-522W1 предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при условиях:

- Температура окружающего воздуха, °C +5..+45
- Влажность 80%

После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 2 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей. Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несёт ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,
телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

10. Свидетельство о приемке

Изделие «**MP-522W1**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Изделие «**MP-522W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru